產品規格







獨立包裝及密封式檢測盒

採便紙

中英文使用說明書

產品編號及包裝規格: 0102002201 (1件裝)

產品條碼: 4 897116 730770

檢測方法: 糞便取樣自我檢測

準確度: 98.12%1

證書: CE證書

儲存條件: 2-30°C/請勿冷藏/避免陽光直接照射

保質期: 12個月

預期用途: 幽幽管by INDICAID™妥析™ 幽門螺旋菌抗原檢測 試劑盒用於體外定性檢測人類糞便樣本中的幽門螺旋菌抗原。 本產品用於幽門螺旋菌感染的輔助診斷。

套裝組件: 1 x 獨立包裝及密封式檢測盒、採便紙、中文使用 說明書、英文使用說明書



- 1 與幽門螺旋菌吹氣測試結果進行對比,總符合率為98.12%。
- 2 使用「三合一療法」,透過服用胃藥及抗生素殺菌,治療成功率高達85%。
- 32017年香港中文大醫學院研究發現香港已有58%人口感染幽門螺旋菌。
- 4國際癌症研究機構亦將幽門螺旋菌界定為可引致胃癌的「第一類致癌物」。
- 5 中華流行病學雜誌2003, 24(6); 443-446。









相達生物科技國際有限公司





家無地

幽門螺旋菌快測 守護家人胃部健康



幽門螺旋菌 抗原檢測試劑盒



什麽是幽幽管?

幽幽管是一款自我檢測幽門螺旋菌的快速抗原檢測產 品,操作簡便,自行採集糞便樣本後10分鐘即有結果。 幽幽管讓您一家無幽,守護您及家人的胃部健康。

早檢測•早發現•早治癒

幽門螺旋菌是一種生存於胃部及十二指腸內的細菌,有機會導 致胃炎、胃潰瘍、胃癌。針對幽門螺旋菌,按照醫生的服藥療程, 其治療成功率可達85%。





香港感染率高

全港近60%人口感染幽門螺 旋菌3。



被定為第一類致癌物4

幽門螺旋菌有機會導致胃炎、胃潰瘍, 胃癌國際癌症研究機構亦將幽門螺旋 菌界定為第一類致癌物,可引致胃癌。



同住容易傳染

60%患者同住家人同被感染5。



幽門螺旋菌吹氣測試(黃金標準)

	幽幽管	吹氣測試
檢測方法	收集糞便進行檢測	喝下測試溶劑後進行吹氣測試
檢測時間	10分鐘	1-2天
檢測地點	在家自行檢測	醫院、診所
準確度	高	高
價錢	\$248	\$600-900
測前服藥	不需要	需要
空腹檢測	不需要	需要

操作步驟



採集糞便樣本 (使用採便紙)

⋒ 提起廁板。

- 取出採便紙,撕開採便紙兩端 的雙面膠紙,並貼於馬桶兩側 (確保採便紙中部懸掛於馬桶的 水面之上)。
- 放下廁板並小心壓在採便紙 上,排便於採便紙上。







進行檢測

- ⋒ 排便後,從包裝中取出檢 測盒。
- 向上拉出檢測盒頂端的橙色蓋, 使用採樣棒上印有螺紋的部份, 連續插入糞便的5個不同位置取 樣。採樣棒螺紋末端須完全插入 糞便。採便後,糞便連採便紙可 直接沖走。
- 完成採樣後將採樣棒插回 檢測盒中。










- 公 左右搖晃檢測盒約10秒鐘, 使糞便樣本充分混勻浸於稀 釋液中。
- 点 拉出檢測盒蓋上的白色部件。 保持檢測盒直立放置,然後壓下 橙色蓋到最低,並開始計時。
- 置於室溫10分鐘後查看檢測 結果。



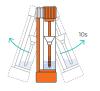









陽性

在(C)和(T)區內分別顯示一條線



C -T- T-

解釋: 樣本中檢測出

陰性

只在(C)區內顯示一條線



解釋: 樣本中沒有檢 測出幽門螺旋菌抗原。

無效

在(C)區內沒有顯示一條線



C

解釋: 本測試無法測定 你是否感染幽門螺旋菌。