

INDICAID®

INDICAID® COVID-19 快速抗原檢測試劑盒



INDICAID® COVID-19 快速抗原檢測試劑盒 使用橫向流免疫分析法，用於直接檢測鼻拭子樣本中的 SARS-CoV-2 抗原，從而檢測 COVID-19 病毒的感染情況。該產品已經取得歐盟 CE 認證。



產品核心優勢

- 結果快速: 只需20分鐘就可以取得檢測結果
- 靈敏度高: 臨床驗證特异性99%，靈敏度96%以上
- 費用低廉: 檢測成本低廉
- 操作簡單: 無需使用特殊專業設備和儀器
- 使用方便: 任何人可以隨時隨地使用

產品編號	2110200	2120100
包裝規格	25's	1's

結果解讀



結果陽性



結果陰性

使用簡單


打開包裝，取出棉棒和測試棒。




把頭向後傾，輕輕地把棉棒伸進鼻孔（約一吋深），在內打圈約5秒。在另一側鼻孔裡重複步驟。



然後扭開蓋子上半部分，露出滴頭。

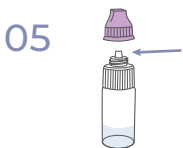

把小瓶垂直置於測試棒上的圓形開口上方，擠出3滴瓶內溶液到開口裡。

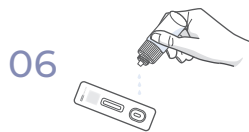


裝有測試溶液的小瓶的蓋子分為兩部分，分別是上半部及整個蓋子。扭開小瓶的整個蓋子，然後把棉棒浸在測試溶液中，來回轉動棉棒20次。轉動時須確保棉棒頂端完全浸泡在溶液中。



03

把蓋子扭緊。立即進行後面的步驟。

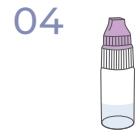

04

置於室溫20分鐘後（不可多於25分鐘）查看檢測結果。



07

更多產品信息，請瀏覽 www.phasescientific.com

PHASESCIENTIFIC